

HIV 1 & 2 Antibody Rapid Test Oncoprobe telah lulus uji evaluasi kualitas hasil.

Dilakukan oleh:

“National Reference Laboratory for HIV Clinical Pathology Department”

Hasil Evaluasi:

Sensitivitas = 100%

Spesifisitas = 100%

Kesimpulan:

Dapat digunakan sebagai screening darah pada diagnosa

dan pengawasan infeksi HIV

Prosedur evaluasi:

- Spesimen uji adalah 150 anti-HIV reaktif dan WB positif, 91 di antaranya reaktif terhadap anti-HIV tetapi negatif terhadap hasil WB, 176 anti-HIV negatif sampel dari 15 provinsi seluruh Indonesia.
- Tes dilakukan di Clinical Pathology Department, Medical Faculty, University of Indonesia, Dr. Cipto Mangunkusumo Hospital. (Terpilih oleh National Reference Laboratory for HIV testing by Ministry of Health)