

Product Fecal Occult Blood Test + Transferrin Oncoprobe telah dilakukan evaluasi oleh Dr. Anik Widijanti dari Laboratorium Patologi Klinik RSUD Saiful Anwar / FKUB Malang.

Hasil dari evaluasi ini dipresentasikan pada User Meeting Oncoprobe 2010 dengan tujuan membandingkan nilai diagnostik FOBT Simultan (Hb dan Tf) dengan FOBT Hb saja pada perdarahan tersamar saluran cerna bagian atas.

Sebagai perbandingan digunakan 100 sampel yang sudah positif terdiagnosa mengalami pendarahan saluran cerna bagian atas dan FOBT Simultan terbukti memiliki nilai sensitifitas 85.42% dibandingkan FOBT Hb saja yang hanya mampu mendeteksi 29.17% dari perdarahan saluran cerna bagian atas.